

ODBĚR BUKÁLNÍHO STĚRU

INSTRUKCE



Před odběrem přibližně hodinu nic **nejezte**, **nepijte** (mimo vody), **nežvýkejte** ani neprovádějte ústní hygienu stejně tak kojeneček nesmí být nejméně půl hodiny před odběrem kojení.



Umyjte si důkladně ruce.



Zkumavku **opatrně otevřete otočením**. Poté vytáhněte část obsahující tyčinku s vatovým tampónkem z obalu. Tyčinku držte pouze za koncovou část – víčko.

(Vždy mějte otevřenou pouze jednu tubu, aby nedošlo k záměně vzorků)



Opakovanými pohyby dolů a nahoru (asi 10-krát) **stírejte povrch vnitřních stran z obou lící** (v ústní dutině), přičemž kroužte tyčinkou tak, **aby se pokryl celý její povrch stěrem**. Pokud se Vám tvoří v ústech sliny polkněte (setřít sliny tampónkem není žádoucí)



Tyčinku poté ponechte minimálně **1 hodinu schnout ve svislé poloze**, aby se konec tampónu ničeho nedotýkal. Pokud nemůžete vzorek usušit ihned po odběru, vložte jej zpět do tuby a vysušte jej při nejbližší příležitosti, nejpozději však do 4-5 hodin od odběru.

Vzorky sušte vždy v dostatečné vzdálenosti od sebe! Dobře vysušené vzorky vydrží bez ztráty kvality několik týdnů, vlhké vzorky se rychle znehodnotí.



Vysušené vzorky opět řádně zašroubujte, zkontrolujte údaje na zkumavce, kde musí být uvedeno číslo objednávky a Vaše jméno. Pokud tomu tak není, doplňte údaje nesmývatelným fixem a vložte zkumavky do uzavíratelného sáčku a následně do přiložené zpětné obálky spolu s pečlivě vyplněnými dokumenty. Vzorky zašlete v nejbližším možném termínu zpět na naši adresu GHC Genetics.

V případě, že budou Vaše vzorky doručeny bez potřebné dokumentace, nemohou být zpracovány. Před odesláním uchovávejte vzorky v pokojové teplotě. V žádném případě je nekládejte do lednice.