



F-87
05-25

ODBĚR BUKÁLNÍHO STĚRU

instrukce



1




Před odběrem přibližně **hodinu nic nejzte, nepijte** (mimo vody), nežvýkejte ani neprovádějte ústní hygienu, stejně tak kojenec nesmí být nejméně půl hodiny před odběrem kojení.

2



Umyjte si důkladně ruce mýdlem, případně také dezinfekcí.

3

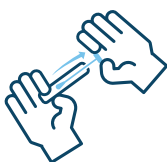

Zkumavku opatrně otevřete otočením víčka. **Poté vytáhněte část obsahující tyčinku s vatovým tampónkem z obalu.** Tyčinku držte pouze za koncovou část – víčko.

4



Opakovanými pohyby dolů a nahoru (asi 10-krát) **stírejte povrch vnitřních stran z obou lící** (v ústní dutině), přičemž otáčejte tyčinkou tak, aby se pokryl celý její povrch stěrem. Pokud se Vám tvoří v ústech sliny, polkněte (setřít sliny tampónkem není žádoucí). Odběrovou sadu uzavřete.

5



Na zkumavku napište své jméno nesmývatelným fixem. **Vzorek vložte do uzavíratelného sáčku a následně do přiložené zpětné obálky spolu s pečlivě vyplněnými dokumenty.** Zásilku zašlete v nejbližším možném termínu zpět na naši adresu GHC Genetics. Poštovné je na naše náklady.

V případě, že budou Vaše vzorky doručeny bez potřebné dokumentace, nemohou být zpracovány. Před odesláním uchovávejte vzorky při pokojové teplotě. V žádném případě je nevkládejte do lednice.