



F-87  
06-25

## ODBĚRU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

### DentalScan – instrukce



#### OBSAH SADY NA VYŠETŘENÍ DENTALSCAN

- ✓ **Návod** k provedení odběru
- ✓ **Dvě sterilní zkumavky** – jedna se žlutým víčkem pro odběr na genetické vyšetření a druhá s modrým víčkem pro odběr na bakteriologické vyšetření
- ✓ **Žádanka na laboratorní vyšetření**
- ✓ **Sterilní odběrové tyčinky** (5 ks v balení)
- ✓ **Předplacená vratná obálka** pro odeslání vzorku zpět do laboratoře

#### NÁVOD NA ODBĚR

Při manipulaci s odběrovými tyčinkami **použijte jednorázové sterilní rukavice a sterilní pinzetu.**

- 01** Každý vzorek odeberte vložením odběrové tyčinky do požadovaného místa, tj. do spodní části sulku postižené dásně, a ponechte ji tam alespoň 10 vteřin.
- 02** Odběrovou tyčinku vložte do zkumavky s modrým víčkem, postup opakujte 4x, zkumavku se čtyřmi odběrovými tyčinkami pečlivě uzavřete.
- 03** Do zkumavky se žlutým víčkem vložte jednu tyčinku s odebraným biologickým materiálem a pečlivě uzavřete.
- 04** Obě zkumavky poté vložte zpět do uzavíratelného igelitového sáčku a ten uzavřete.

#### DALŠÍ POSTUP

Vyplněnou žádanku, podepsaný informovaný souhlas a zkumavky s odebraným biologickým materiálem vložte do příložené A5 obálky a pošlete do laboratoře.



##### Skladování a přeprava

**Odebrané vzorky před odesláním do laboratoře můžete skladovat maximálně 4 dny v chladničce.**

Na přepravu vzorků do laboratoře nejsou dále kladeny speciální požadavky.

